

# TEK KULLANIMLIK YAĞ DOLGU KİTİ

## YAĞ TRANSFERİ İÇİN NEDEN TEK KULLANIMLIK KİT?



hasta açısından kontaminasyon riskinin doğmasına neden olabilmektedir.

Otolog yağ harmanlaması ve tekrar greftleme için gerekli tüm aletleri kapsayan tek kullanımlık bir kitle çalışılması tüm bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Uygulayıcılar tekrar kullanılabilen kanüllerle çalışmayı seçtikleri zaman iki önemli sorunla karşılaşılıyorlar: bu aletlerin temizlenmesi ve sterilizasyonu.

Bu iki aşama komplike, zaman-kaybettirici, oldukça karmaşık ve hepsinden önemlisi önceki hastanın yağlarının tamamının temizlenebildiğinin garanti edilememesi ve bundan dolayı sonraki



**LIPO SCULPT**  
DISPOSABLE LIPOFILLING KIT

## KİT KOMPOZİSYONU & KULLANIM TALİMATLARI

### **1 X Bistüri 11**

İnfiltrasyon kanülünün penetrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla cilt ponksiyonu oluşturmak için kullanılır.

### **1 X İnfiltrasyon Kanülü Ø 2.10 L150 10 Orifices**

Dilute anestetik solüsyonla birlikte ilgili alanın infiltre edilmesinde kullanılır.

### **1 X Yağ Toplama Kanülü Ø 2.80 L200 7 Orifices**

Daha önce infiltre edilen alandan yağın alınma işleminde kullanılır.

### **5 X Luer Lock Şırıngalar 20ml**

Maksimum konuma geri çekilen piston sayesinde tetiklenen negatif basınçla yağ toplamada kullanılır.

### **5 X Luer Lock Kapaklar**

Yağ alındıktan sonra 20ml şırıngaları kapamakta kullanılır.

### **2 X 3ml Luer Lock Şırıngalar**

Alınan yağların tekrar enjekte edilmesinde kullanılır.

### **3 X Yağ Enjeksiyon Kanülleri**

Ø 2.00 L150

Ø 1.65 L100 1 Orifice

Ø 0.90 L65 2 Orifice

Yağın tekrar enjeksiyonu için kullanılır. Enjeksiyon alanına göre gerekli çap ve uzunluktaki kanüller seçilir.

### **3 X FLL Bağlantı**

Lipodolgu için 20ml şırıngalardan 3ml veya 1ml şırıngalara yağ transferinde kullanılmak içindir.

### **2 X 1ml Polikarbonat Şırıngalar**

### **1X Webster İğne Askısı**

### **1X Sütür 12mm L75**

Kutanöz giriş noktasına dikiş atmak için kullanılır.