

Dermyal[®]

Crossed Linked Monophasic Hyaluronic Acid

THE ULTIMATE HYALURONIC ACID FILLER



SWISS
MADE

GET BETTER RESULTS WITH DERMIAL
Stronger - Safer - Faster - Longer



Alın kırışıklıkları
Dermyal¹⁸

Glabellar kırışıklıklar
Dermyal & **Dermyal**^{24R}

Periorbital kırışıklıklar
Dermyal

Burun deformiteleri
Dermyal^{24R}

Yanak hacmi
Dermyal^{32HR}

Nazolabial katlantılar
Dermyal & **Dermyal**^{24R}

Peribukkal kırışıklıklar & Vermilion
Dermyal¹⁸ & **Dermyal**^{24R}

Dudak hacmi
Dermyal^{24R} & **Dermyal**^{32HR}

Çene ve Jawline hattı
Dermyal^{32HR}

Hoşnutsuzluk kırışıklıkları
& Oral komissür
Dermyal^{24R} & **Dermyal**^{32HR}

THE ULTIMATE HYALURONIC ACID FILLER

LABORATOIRES
COSMO SCIENCE
GENÈVE


Cosmoscience Laboratuvarları Cenevre'de kurulmuş olup 1994 yılından günümüze
değin medikal kozmetoloji ve mezoterapi alanlarında ürünler geliştirmektedir.
Cosmoscience Laboratuvarları, çalışmalarını tamamen, non-invazif medikal estetik
uygulamalarına yönelik olarak yenilikçi, etkili ve her yönüyle güvenli ürünlerin
geliştirilmesine adamıştır.

 LABORATORIES
MATEX LAB™
SWISS TECHNOLOGY

Dermyal® HA bazlı dermal dolgular oldukça güvenilir ve kalıcılığı uzun vadelidir.
Yapılan bölgeye ve cilt tipine bağlı olarak etkisi 9-12 ay arası stabildir.
İsviçre kalitesi ve güvenilirliği ile sunulan Dermyal Dolguları Cenevre,
Matex Laboratuvarlarında üretilmektedir. İçerdikleri hyaluronik asit ve BDDE
çapraz bağlayıcı konsantrasyonlarına göre üç farklı formda sunulmaktadır.

Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler

Swiss Quality

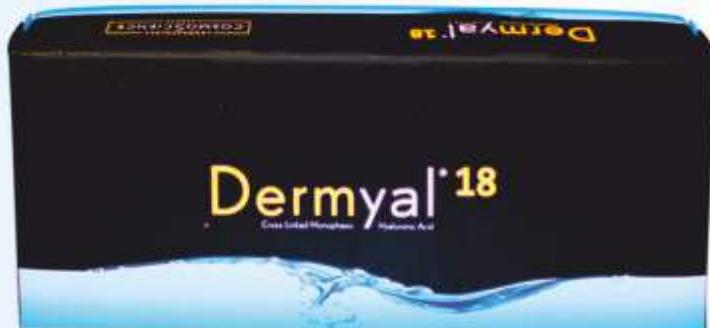

Dermyal 18

18 mg/ml HA
%1 BDDE Çapraz Bağ



Dermyal 24R

24 mg/ml HA
%3 BDDE Çapraz Bağ



Dermyal 32HR

28 mg/ml HA
%5 BDDE Çapraz Bağ

Get Better Results With

Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler


İsviçre Farkıyla Değişim Zamanı

→ Dermyal ile yenilenmenin tam zamanı!

- Daha dolgun dudaklarınız ve **daha** belirgin elmacık kemikleriniz olsun istiyorsanız;
- Elleriniz, boyun ve dekolte bölgeiniz daha pürüzsüz, daha genç görünüşün istiyorsanız;
- Daha parlak, daha canlı ve daha dolgun bir yüzünüz olsun istiyorsanız;
- **Yüzünüzdeki** ince kıskıklardan; derin çizgilerden, göz altınızda oluşan çukurlardan, yüzünüzün diğer bölgelerinde meydana gelen çökmelerden ve sizi yorgun gösteren ifadeden şikayetçiyseniz;



DERMYAL ile
Güvenilir, Konforlu ve Uzun Süreli Dolgu Keyfini
Siz de Yaşamalısınız!

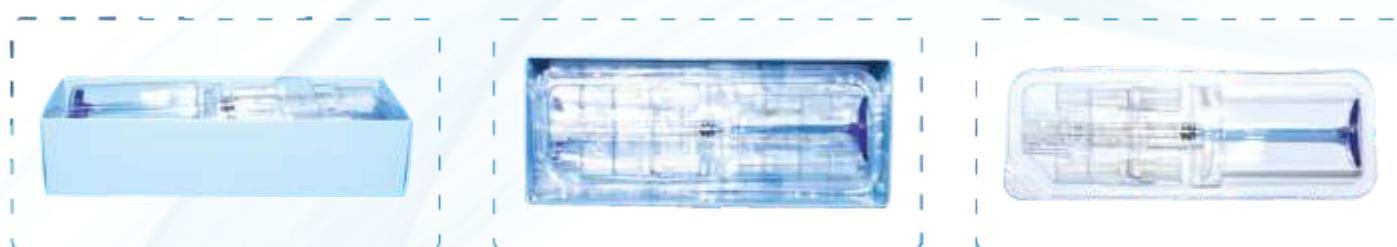

Dermyal[®]
Cross-Linked Monophasic Hyaluronic Acid

Get Better Results With
Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler



Takdim & Endikasyonlar

Dermyal® bakteriyel fermantasyon ile üretilen yüksek moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asitin, en güvenilir çapraz bağlama ajansı olan BDDE kullanılarak **CPM® (Cohesive Polydensified Matrix)** teknolojisi sonucu retiküle forma getirilmesi ile elde edilir.

Dermyal® monofazik bir Üründür. Dokuda homojen dağılımı son derece doğal sonuçlar sunar.

Dermyal® dokunun hacminde hızlı bir artış sağlar, hyaluronik asit kolay ve etkin bir şekilde dokuda yer alır. Önceden bir tahlil yapılmasını gerektirmez ve dolayısıyla ilk konsültasyondan başlayarak tek defada enjekte edilebilir.

Dermyal® yüzün yeniden yapılandırılmasında, dudak, elmacık kemiği ve çenenin yeniden şekillendirilmesinde ve kırsıklıkların, çökmelerin, asimetrlilerin giderilmesinde güvenilir ve etkin sonuçlar sunar.

Dermyal® Estetik Tıbbında 20 yılı aşkın tecrübe sahip Cosmoscience laboratuvarı tarafından geliştirilen, İsviçre'de üretilen Class III Medikal Cihaz lisansına sahip bir Üründür. **Dermyal®**'in kalıcılığı, etkinliği ve güvenilirliği binlerce hasta Üzerinde yapılan klinik çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Ürünün entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, prosedürü takiben iki saat boyunca yoğun yüz ifadelerinden ve aşırı shobetten kaçınılması tavsiye edilir.

İlk uygulamada, **Dermyal®** etkisini optimize etmek için, ilk seanstan bir ay sonra kısa bir canlandırma seansı yapılması tavsiye edilir. İkinci **Dermyal®** uygulamasından sonra dolgu etkisinin **9 - 12 ay stabil** kalması beklenir.

Get Better Results With

Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler

Takdim & Endikasyonlar

Kırışıklıklar, dermis ve subkutanöz dokunun spesifik bölgelerinin yapısında meydana gelen farklı modifikasyonlar sonucu oluşmaktadır. Kırışıklıklar dört ana grupta tanımlanabilir.

- a) İnce atrofik kıritıklıklar, **Tip1**
- b) Kalıcı elastotik kıritıklıklar, **Tip2**
- c) Dinamik ekspress kıritıklıklar, **Tip3**
- d) Yerçekimine bağlı kıritıklıklar, **Tip4**

Dermyal 18: Hafif ve orta şiddetteki kıritıklıklar için uygundur. (Tip 1) (18mg/ml HA)

Dermyal 24R: Orta ile şiddetli kıritıklıkları için uygundur.

(Tip 2 – Tip 3; Cildin tekstürü makroskopik olarak bozulmuştur. Ana hatları düzensiz, pürüzlü ve derinleşmiştir.

İkinci hatlar dışarı doğru düzleşmiş, deform olmuş ve giderek kaybolmuştur.) (24mg/ml HA)

Dermyal 32HR: Şiddetli kıritıklıklar, çok şiddetli kıritıklar ve volum amaçlı derin dolgu uygulamaları için uygundur. (Tip 3–Tip 4) (28mg/ml HA)

Tip 3 ekspress kıritıklıklarda, yoğun şekilde dilute botulinum toksini ile uygun şekilde kombiné Dermyal® 24R veya Dermyal® 32HR enjeksiyonu yararlı olabilir.



Get Better Results With

Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler

Tedavi Sonuçları

Nazolabial Katlantılar



Öncesi



Sonrası

Periorbital Kırışıklıklar



Öncesi



Sonrası

Dudak Hacmi



Öncesi



Sonrası

Derin Yüz Yapılandırması



Öncesi



Sonrası

Get Better Results With

Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler

Dermyal®

Cross-Linked Monophasic Hyaluronic Acid

Get Better Results With
Dermyal The Ultimate Hyaluronic Acid Filler

ERDAĞI
MEDIKAL
ERDAĞI GROUP

Şenlikköy Mh. Harman Sk. No:16/6
Florya, Bakırköy / İSTANBUL
T. 0212 445 3424
F. 0212 445 3427
M. info@erdagimedikal.com

LABORATOIRES
MATEXLAB™
SWISS TECHNOLOGY

LABORATOIRES
COSMO SCIENCE
GENÈVE